



ventisept B plus

Gebrauchsfertiges Universal-Bohrerbad

CE 0482

- aldehyd- und phenolfrei
- ausgezeichnete Reinigungskraft
- angenehmer Geruch
- guter Korrosionsschutz

Produktbeschreibung

ventisept B plus ist ein gebrauchsfertiges, Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von zahnärztlichen Bohrern und anderen rotierenden Präzisionsinstrumenten inkl. Wurzelkanalinstrumenten.

ventisept B plus ist nahezu pH-neutral und eignet sich daher auch für besonders empfindliche Materialien wie z.B. für Aluminiumbohrer, Gummipolierer, Hartmetallbohrer und Schmierer, Kronenabtrenner, Diamantschleifer, sowie keramische Schleifkörper und Arkansassteine.

Anwendungsgebiete

Gebrauchslösung zur Desinfektion aller prothetischer Arbeiten, Abformlöffeln aus Silikon, Polyether, Alginate, Hydrocolloid.

Anwendung

ventisept B plus ist zur desinfizierenden Reinigung im Ultraschallbad und im Fräsator geeignet. Instrumente sofort nach Gebrauch in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein. Nach der Desinfektionszeit Instrumente gründlich abspülen und trocknen. Je nach Verschmutzungsgrad Lösung erneuern.

Einwirkzeiten

bakterizid (inkl. MRSA), levurozid

gem. DGHM/VAH konz. 5 Minuten

tuberkulozid (M. terrae) konz. 15 Minuten

virusinaktivierend (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-, Influenza-, Grippeviren) konz. 5 Minuten

Wirkungsspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA)
- levurozid
- tuberkulozid
- virusinaktivierend (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-, Influenza-, Grippe-, Rota-Viren)

Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:
0,28 g Didecyloxethylmethylammoniumpropionat
0,19 g Alkylpropylendiaminbisguanidiniumacetat

Lieferformen

Gebinde	Art.-Nr.
5 Liter	105930
10 Liter	105940

Dosierhilfen

Dosierpumpe, Kanisterumfüllhahn

Listung / Registrierung

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittel des VAH. Entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte.

Hinweise

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.