

Gebrauchsfertiger Abformdesinfektionsreiniger

VENTALGIN

- ✓ gute Benetzungseigenschaften, problemlos abspülbar
- ✓ reinigungsstark
- ✓ gute Materialverträglichkeit – greift die Oberflächen nicht an

ventalgin ist ein gebrauchsfertiger Desinfektionsreiniger zur schnellen und nachhaltigen Tauchdesinfektion und -Reinigung von Abformungen auf der Basis von Aldehyden und quartären Ammoniumverbindungen.

ventalgin desinfiziert ohne Beeinträchtigung des Dimensionsverhaltens und der Oberflächenqualität.

ventalgin ist farb- und geruchsneutral.

Anwendungsgebiete:

Gebrauchslösung zur schnellen Desinfektion und gründlichen Reinigung aller prothetischer Arbeiten, Abformlöffel und Abformungen aus Silikon, Polyether, Alginat und Hydrocolloid.

Anwendung:

Alginat und Hydrocolloide kurz eintauchen und anschließend 10 Min. abtrocknen lassen.

Andere Materialien in die Lösung einlegen (Einwirkzeit beachten), anschließend mit Wasser abspülen.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

0,01 g Pentandial; 0,2 g Ethandial; 0,48 g Benzylalkyldimethylammoniumchlorid.

Besondere Hinweise:

Enthält Glyoxal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblattauf Anfrage erhältlich. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Wirkspektrum und Einwirkzeiten:

bakterizid inkl. MRSA, levurozid, wirksam gegen Rota-Viren 5 Min.
wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV/BVDV sowie Vaccinia- und Influenza-Viren
(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) 1 Min.

Zulassung und Listungen:

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Nur zur professionellen Anwendung, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verfügbare Gebindegröße

5 Liter

REF

106103

PZN

06920960

CE 0482

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de