

# mobilomed Quicksept Pur

## Alkoholische Schnelldesinfektion

- Aldehyd-, phenolfrei
- Viruzid gem. RKI-Empfehlung
- Wirksam gegen Noro-Viren
- Parfüm- und rückstandsfrei



### Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Flächen aller Art und medizinischem Inventar. Es ist sehr gut für den Lebensmittel- und Küchenbereich geeignet, da das Produkt parfümfrei ist und rückstandsfrei trocknet.

**Quicksept Pur** ist parfümfrei und rückstandsfrei. Es weist zudem eine gute Hautverträglichkeit auf und ist somit für Allergiker und hautempfindliche Personen empfohlen.

**Nicht anwenden bei alkoholempfindlichen Oberflächen!**

### Anwendung

Flächen und Gegenstände mit **Quicksept Pur** vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Versprühen ist nur für unzugängliche Bereiche zulässig.

### Wirkungsspektrum

**Quicksept Pur** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid (C.albicans)
- begrenzt viruzid

### Einwirkzeiten

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid) gem.

DGHM/ VAH Richtlinien	1 min
Tuberkulozid	30 Sek.
Begrenzt viruzid	30 Sek.
TBC	30 Sek.
Influenza Viren/Grippen Viren	30 Sek.
Noro-Virus)	5 Min.
Vaoniavirus	1 Min.
Salmonellen, Listerien	1 Min
SARS-Coronavirus	1 Min

**Zusammensetzung** 100g Lösung enthalten:  
45,0g Ethanol

### Gutachten

**Prof. Schubert, Hygieniker, Frankfurt am Main:**

Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM-Richtlinien vom 09.03.2011

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit nach DGHM-Richtlinien

**Dr. Suchomel, Hygieniker, Wien:**

Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM-Richtlinien vom 07.03.2011

**Prof. Werner, Hygieniker, Schwerin:**

Gutachten zur Wirksamkeit gegen Noro-Vieren (MNV)

### Besondere Hinweise

Entzündlich. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Dampf/ Aerosol nicht einatmen Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. **Für Kinder unzugänglich aufbewahren!** Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. **Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

### Listungen/ Registrierungen

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/ VAH.

DVG gelistet.

Registriert als Biozid-Produkt bei der Baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: Baua Reg.-Nr.: N-44180

### Lieferformen

500 ml (Flasche)

1 l (Flasche)

5l (Kanister )