

## mobilomed msept Quicksept A

### Alkoholische Schnelldesinfektion

- aldehydfrei (Allergiker geeignet)
- duft- und farbstofffrei
- sehr schnelle Einwirkzeit



### Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion

#### ANWENDUNGSBEREICHE

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf Ethanolbasis zur wirksamen und schnellen Desinfektion von nicht-invasiven medizinischen Geräten und alkoholresistenten Oberflächen aller Art. Umfassendes Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und alle Viren (viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren).

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

#### ANWENDUNG

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit, jedoch mindestens 30 Sekunden, feucht halten.

#### EINWIRKZEITEN UND KONZENTRATIONEN

(Gebrauchsfertige Lösung! Nicht verdünnen!)

	Zeit
Bakterizid und levurozid (inkl. MRSA, VRE, Cand.albicans)	30 sek
Mykobakterien (M.Avium, M.Terrae)	30 sek
Viren (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rota, Noro)	15 sek
Adenoviren	30 sek
Polioviren	2 min
Schimmelpilze	2 min

**Prüfungen:** EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: Ethanol 57g, Isopropanol 6g

BAuA- Nr: N-100110

UFI Code: QDKK-PJQC-M00H-W790

## LIEFERFORMEN

Artikelnummer	Inhalt	Flasche	VPE
285694	1 Liter	Keulenflasche mit Scharnierdeckel	8 x 1L
285695	5 Liter	Kanister	3 x 5L

## BESONDERE HINWEISE

Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet und in Deutschland als Biozid registriert.

## KENNZEICHNUNG GEMÄß GEFÄHRSTOFFVERORDNUNG

### GEFAHR

Verursacht schwere Augenreizung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

### Nur zur professionellen Anwendung

## LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Das Produkt nicht unter 5 Grad und über 30 Grad lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Alle Behältnisse und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE).

Die Behältnisse und Verschlüsse sind entsprechend gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung und eine optimale Wiederverwertbarkeit zu ermöglichen. Vollständig restentleerte Verpackungen können dem Recycling (Sammelstelle) zugeführt werden.

### Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

**Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

## HERSTELLER

mobiloclean Handelsgruppe GmbH & Co.KG

Lilienthalallee 5

80807 München

Stand der Information 05/2021